



80028373 Ver. A
Revisjonsdato: 2021-04
©2021 Welch Allyn, Inc.
Med enerett.



hillrom.com

Dette produktet produseres av Welch Allyn, Inc. under lisens av Braun-varemerket. «Braun» er et registrert varemerke for Braun GmbH i Kronberg i Tyskland. ThermoScan er et registrert varemerke som eies av Helen of Troy Limited.

Teknisk støtte hos Hillrom

hillrom.com/en-us/about-us/locations/

Welch Allyn, Inc. er et datterselskap av Hill-Rom Holdings, Inc.

Rengjøringsveiledning

Selve termometeret



MERK Legg en ny probehette på termometeret før rengjøring.


Godkjente rengjøringsløsninger

- 70 % isopropylalkohol eller etanol
- Hydrogenperoksid (Virox, Oxivir)
- Kvartære ammoniumforbindelser (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes®, Sanicloth)
- 10 % klorblekeløsning




Tørk av. La det tørke i 5 minutter.
Kontroller at selve termometeret er tørt før bruk.

Termometerkontakter

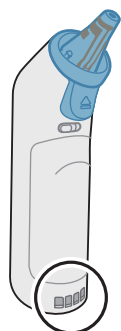

Godkjente rengjøringsløsninger

- 70 % isopropylalkohol eller etanol

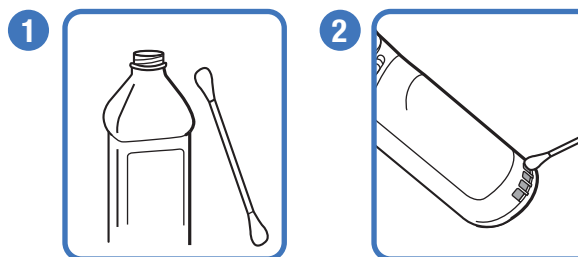

Legg termometeret til side i 1 minutt, slik at kontaktene kan lufttørke.

Linsevindu og probe



Godkjente rengjøringsløsninger

- Bare 70 % isopropanol eller etanol!



Tørk av. La det tørke i 5 minutter.
Kontroller at vinduet på probelinsen er tørt før bruk.