



MONTERINGSANVISNING

Toalettarmstøtter for Palma Vita/Lima Vita Varenr. J1030

Monteringsanvisning

Les nøye gjennom monteringsanvisningen. Dersom det finnes uklarheter, vennligst kontakt Handicare AS.

1) Bryt strømmen

Dekslet til toalettet skal demonteres. Av sikkerhetsmessige årsaker skal strømmen til Clos-O-Mat slås av – enten med en separat bryter eller ved å ta støpslet ut av kontakten.

2) Demonter øvre og nedre deksel

Fjern gummipluggen (A) som sitter midt på det øvre dekslet. Løsne skruen som sitter innenfor gummipluggen. Når skruen er løs, kan dekslet enkelt hektes av. Skru løs skruen (B) med en stjerneskrutrekker. Løft opp begge de bakre trådbøylene (D). Trekk begge sidene ut i bakkant på nedre deksel (C) og løft dette bort fra toalettet. Legg begge dekslene til side.

3) Demonter sete og lokk

Løft opp lokket. Grip setet med innsiden av tommelfingrene på setefestene og hold med fingrene. Trekk rett opp med et lite rykk.

4) Demonter sittingsbryteren

Løsne sittingsbryteren som sitter skrudd fast på undersiden på det venstre setefestet sett forfra.

5) Fest porselenet til rammen

Det er meget viktig at porselenet ikke beveger seg i forhold til rammen. Fest derfor porselenets bakkant til rammen med en skrutvinge.

6) Demonter setefestene

Løsne mutterne (E) med en 24 hylsenøkkel som holder fast setefestene.

Viktig: Skiven for sittingsbryteren skal ikke lenger benyttes når toalettøttene monteres. (Kun en skive skal monteres på igjen, den tynneste.)

Fjern setefestene.

7) Montering av toalettarmstøttene

Rengjør porselensflaten der støttene skal monteres. Plasser toalettarmstøttene forsiktig på toalettet slik at hullene i armstøtten passer med hullene i toalettet. Sett setefestene i hullene og skru fast igjen.

Monter deretter setet.

8) Monter øvre og nedre deksel

Følg omvendt prosedyre for demontering av dekslene.

På en gulvmontert Palma Vita må den ene armstøtten demonteres før det nedre dekslet monteres. Fjern det hvite plastlokket på yttersiden av armstøtten. Skru deretter løs armstøtten, monter det nedre dekslet og avslutt med å skru på armstøtten igjen. Sett plastlokket på plass.

9) Funksjonskontroll

Prøvebelast armstøtten. Kontroller at begge armstøttene kan felles opp uten at disse hindres.

10) Rengjøring

Bruk vanlig rengjøringsmiddel.

11) Brukervekt

Største brukervekt 120 kg - og 80 kg er største belastning på hver armstøtte.

12) Materiale

Toalettarmstøtten er laget i stål med 2 lag pulverlakk.