

# Resirkulering av CLOS-O-MAT

*Utført/kommentar*

1	Registrer toalets serienr. og produksjonsår. Serienr.: _____ Produksjonsår: _____	
2	Desinfiser og rengjør toalettet innvendig og utvendig.	
3	Gjør en funksjonstest.	
4	Kontroller spyleventilspakning og flottørventilspakning. Bytt disse hvis nødvendig. Bytt alltid dersom toalettet er eldre enn 5 år.	
5	Dersom toalettet er under 10 år, er det vanligvis ikke nødvendig å gjøre noe med munnstykke og pumpe. Dersom toalettet er eldre enn 10 år, sjekk at pumpen er tett og fungerer som den skal.	
6	Kontroller at munnstykket fungerer tilfredsstillende. Munnstykket skal gå helt inn. Dersom munnstykket er slitt, må dette byttes.	
7	Kontroller at termostatene og kretskort fungerer slik de skal. Juster om nødvendig. Defekte termostater og kretskort byttes.	
8	Bytt deksler, sete og lokk dersom disse bærer preg av slitasje.	
9	Legg ved nytt avløp og ny bruksanvisning.	
10	Clos-O-Mat kan distribueres til ny bruker.	

Utskiftede deler og reparasjonsarbeid faktureres etter rammeavtale.

Dato: .....

Utført av: .....



**handicare**

Telefon 03250  
www.handicare.no