

TILPASNING AV CLOS-O-MAT FOR BRUK SAMMEN MED SOLO

1. Ta av dekslet på Clos-O-Mat. Løsne sitteringsbryteren og kortslutt denne med en liten ledningsstump. Sitteringsbryteren er den lille runde strømbryteren som aktiveres når sitteringsbryteren trykkes ned. Monter sitteringsbryteren igjen.
2. Løsne ledningen som er koplet til i midten av microbryteren. Mikrobryteren er den bryteren som aktiveres når man trykker inn en av de to albuebryterne. Isoler ledningene som løsnes.
3. Monter den pneumatiske bryteren i henhold til egen monteringsanvisning for denne.
4. Fjern sete og lokk på Clos-O-Mat ved å løsne begge de hvite plastskruene.
5. Clos-O-Mat er nå klar til bruk sammen med Solo toalettløfter.
6. Vanlig nedspyling skjer ved å trykke inn en av de to albuebryterne.
7. Ved å trykke inn den pneumatiske bryteren starter dusjingen via munnstykket og nedspyling skjer.
8. Varmluftsviften starter automatisk når den pneumatiske bryteren slippes.