

SEKUMATIC® FR



- Høyeffektiv rengjøring
- ▲ Ferdig løsning har pH > 10 ved 55 °C
- ▲ Parfyme- og skumfri (inneholder ikke tensider)
- ▲ CE-merket i henhold til MDD 93/42/EØF
- ▲ Oppfyller standarden for vaskedekontaminatorer, ISO 15883

Alkalis maskinoppvaskmiddel for spyle-/vaskedekontaminatorer

- Sekumatic® FR er et flytende, alkalisk maskinoppvaskmiddel for medisinske og dentale instrumenter, med utmerket rengjøring av typisk smuss som f.eks. blod, proteiner og serum.

Produktet er formulert for å kombinere effektiv oppløsning av smuss med høy materialkompatibilitet

samt skånsomhet mot oppvaskgodset. Produktet er imidlertid ikke kompatibelt med lakkert aluminium.

- ▲ **Bruksanvisning:** Det viktigste bruksområdet utgjøres av medisinske instrumenter som tåler termisk desinfisering. Den optimale arbeidstemperaturen for Sekumatic® FR er 55 °C. Den ferdige bruksløsningen har pH > 10 ved 55 °C.

Kun for profesjonell bruk.

Avhengig av vannkvaliteten anbefales en dosering på 3–5 ml/l (0,3–0,5 %) gjennom maskinens alkalieresistente doseringspumpe. Sekumatic® FR motvirker kalkbelegg i maskin, munnstykke og rørledninger. For nøytralisering etter rengjøring med et alkalisk middel anbefales en dosering på 1–3 ml/l av Sekumatic® FNZ.

- ▲ **Teknisk informasjon:** Kjemisk sammensetning: Kaliumhydroksid (tensidfri), pH-verdi konsentrat: 14,0, pH-verdi i bruksløsning (20 °C) ~ 12,0, densitet: 1,35 g/ml. Ledeevne (3–5 ml/l, 20 °C): 2,5-4,0 mS/cm.

- ▲ **Forpakninger:**

Art. nr.: 3023670	3 x 5 l
Art. nr.: 3023490	1 x 200 l