


# FLEXIBASIC



FlexiBasic er et system til kjøkkenbenk, hvor det er behov for høydejustering kun når boligen bytter beboer. Kjøkkenbenk med lengde 60-300 cm, og som bærer både koketopp og oppvask kum, kan høydejusteres. FlexiBasic kan oppgraderes til FlexiManual eller FlexiElectric, hvis det skulle bli nødvendig i fremtiden. FlexiBasic er en god økonomisk løsning til kjøkken i omsorgsboliger og institusjoner.

# FlexiBasic

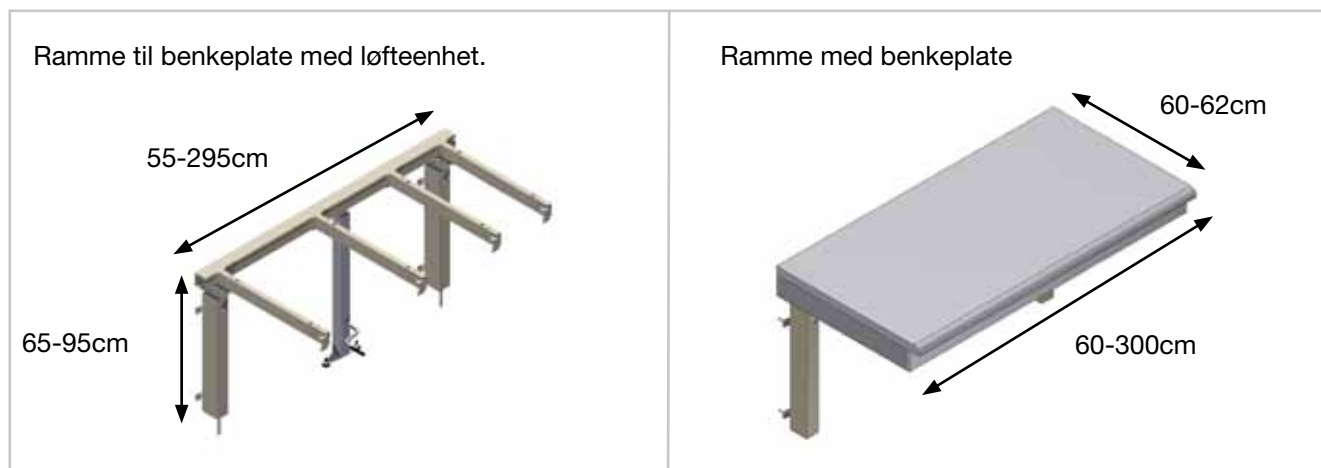

Varenr.	30-63060/ 30-63100	30-63105/ 30-63150	30-63155/ 30-63200	30-63205/ 30-63250	30-63255/ 30-63300
Lengde på bordplaten	60 - 100cm	105 - 150cm	155 - 200cm	205 - 250cm	255 - 300cm



VertiBasic forfra med løfteenhet.

## Tilbehør:

Løfteenhet  
30-63402



Dekk kappe  
30-67735



## Tips

- Sørg for å ha 3-5 mm fri plass på hver side av benkeplaten.
- Ben og knekter kan flyttes sideveis, slik at det er plass til diverse installasjoner.
- Monter forsarg på 5-8 cm under benkeplaten for å skjule knektene.
- Benkeplaten må ikke avmonteres ved høydejustering.
- Løfteenheten plasseres på midten av rammen, skruer øverst på bena løsnes og ved hjelp av løfte enheten justeres benkeplaten til ønsket høyde. Skruene festes igjen og løfteenheten fjernes.
- Maksimal belastning av rammen er 150kg jevnt fordelt over hele benke platen.



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no