


FlexiElectric – Montering av deksel 30-74060 - 30-74300

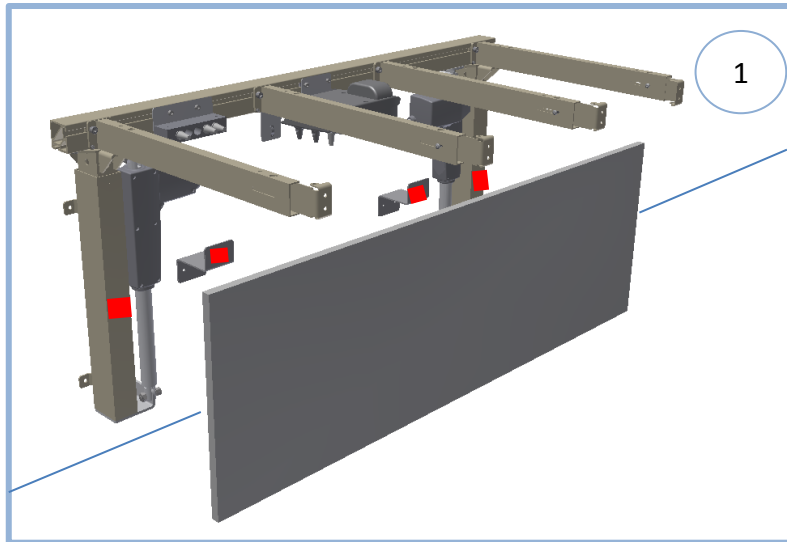

1. Z-Beslagene monteres på veggen. Det monteres velcro på benenes forside, på Z-beslagene og på den siden av nedre dekselplate som vender inn mot veggen. Velcroen på platen må treffe velcroen på ben og z-beslag, og krok/løkke må få feste.

■ = Velcro

2. Nedre dekselplate festes. Vinkelbeslagene skrues fast på øvre dekselplate, slik at det er 120 mm mellom overkant dekselplate og overkant vinkelbeslag.
3. Vinkelbeslagene skrues fast i bordpladen, slik at det er ca. 5 mm luft mellom dekselplatene.

