



# BENLØFTER QURIR

Tilbehør som hjelper brukeren å løfte føttene fra gulvet og inn i midten av sengen



*at the heart of healthcare*

# BENLØFTER QURIR



## Benløfter Qurir

Benløfter Qurir er et hjelpemiddel som hjelper brukeren å få føttene opp i fra gulv og hele veien inn i midten av sengen. En del brukere kan ved hjelp av Qurir klare seg selv i denne forflytningen, mens andre krever assistanse fra pleiepersonell. Løfting av bein består av mange tunge momenter som underlettes ved bruk av benløfter Qurir.

## Kombiner med reduksjon av friksjon

Ved bruk av benløfter Qurir kan det forekomme en viss risiko for vridning i hoften. For å unngå dette anbefales å bruke en myk dreieskive, TurnTable soft, under sete ved forflytning. Bruk av silkelaken vil også gi redusert friksjon under sete og vil være med på å avlaste denne vridningen.

## Andre bruksområder

I tillegg til løfting av tunge bein opp i sengen, kan benløfter Qurir også brukes i andre momenter. Når bruker ligger i sengen, kan benseilet plasseres lengre opp på leggen slik at foten frigjøres når den løftes. I denne posisjonen kan man utføre for eksempel fotpleie, omlegging av sår og/eller trykkavlastning av hæler i en kort periode. Om bruker har hevelse i føtter, ankel eller legg, kan benløfter Qurir enkelt løfte føttene til en hevet posisjon for avlastning.

## Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlig rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Benseilet og løftebåndet kan vaskes i maskin på 60 grader. Husk å ta ut støtteskinnene i seilet før vask.

### SPESIFIKASJONER

Lengde på løftearm	ca. 100 cm
Lengde på løftebånd std.	ca. 50 cm
Løftehøyde	ca. 95 cm
Maks. vektbelastning	70 kg
Vekt	7,5 kg

