

SLIK BRUKER DU VENDLET BASIC



Hev motorrullen




Senk motorrullen



Forflytning av brukeren

1. Dobbelklikk på for å aktivere VENDLET systemet. Da høres et lydsignal og den grønne dioden lyser. Når håndkontrollen ikke har vært bruk i 90 sekunder, er VENDLET systemt deaktivert igjen.
2. Hev motorrullen: Hev motorrullen med begge hender til den låses i begge hjørnestolpene. Husk å slakke trekkklakenet ved å trykke på eller før du løfter motorrullen.
3. Senk motorrullen: Løft motorrullen og trykk på den grå knappen på hjørnestolpen i hodeenden. Når den slippes, kan du senke hodeenden av motorrullen. Gjør det samme i fotenden.
4. Forflytningen av den sengeliggende skjer ved å benytte funksjonene på håndkontrollen. NB: Motorrullene på VENDLET Basic dreier samtidig. Når den røde motorrullen trekker, slakker den blå motorrullen og omvendt.

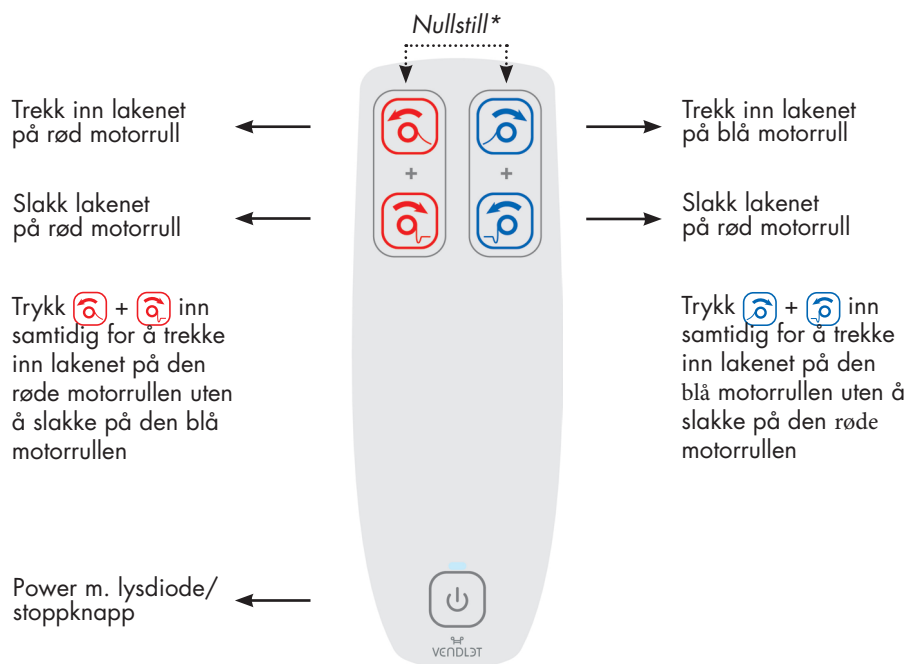

5. Dersom den sengeliggende må bruke sengegrind, slakk trekkklakenet og hev motorrullene.
6. Dersom den sengeliggende ikke trenger å bruke sengegrind, senk motorrullene.

Fokuserer alltid på den sengeliggende når VENDLET brukes.

* Hvis det er en akustisk alarm, kan systemet nullstilles ved å trykke inn de 2 øverste knappene på håndkontrollen samtidig. Det høres da en rekke rytmiske pipe-lyder. Hold knappene inne inntil pipe-lydene stopper.



- knappen fungerer også som stoppknapp



VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen.

Skann QR-koden for å se instruksjons film



LEGG PÅ GLIDELAKEN











1. Før strikkene i hjørnene på glidelakenet rundt madrassen.
2. Sjekk at overflaten er glatt og jevn uten folder. Den glatte siden skal vende opp.
3. Fest borrelåsbåndene rundt madrassens liggeflate. Det er viktig at båndene monteres rundt madrassens liggeflate, og ikke rundt sengerammen, fordi sengens rygg-, lår og fotdel ellers ikke kan heves.



LEGG PÅ TREKKLAKEN M. QUICK TAG



1. Plasser trekkklakenet midt på sengen.
2. Trykk kanten av trekkklakenet ned i sporet på den ene motorrullen. Start oppe i hodeenden og arbeid deg ned mot fotenden.
3. Trekkklakenet skal alltid kjøre OVER motorrullene for å unngå at den sengeliggende får fingre, hår eller lignende i klem under lakenet. Hvis lakenet føres under motorrullene, reduseres trekraften og motorene slår seg av når trekkklakenet stammes inn på motorrullen.
4. Kjør ca. 3/4-del av lakenet inn på motorrullen ved å trykke på  eller  på håndkontrollen.
5. Trykk kanten av trekkklakenet ned i sporet på den andre motorrullen.
6. Kjør trekkklakenet inn på denne motorrullen ved å trykke på  eller  inntil lakenet ligger glatt på madrassen med den røde stripen midt på madrassen.
7. Skulle trekkklakenet være for løs på den ene siden, kan du stramme trekkklakenet ved å trykke samtidig på  +  eller  + .



VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen

Skann QR-koden og se en video av, hvordan du fester glidelaken og trekkklaken

