



OPTIMAL EVAKUERINGSBLANKET

Enkelt og sikkert hjelpemiddel for evakuering



at the heart of healthcare

OPTIMAL



Egenskaper

Evakueringslaken Optimal plasseres under madrassen og festes til madrassen med hjørnestropper. Det er lett å plassere og finnes i flere størrelser for å kunne passe til de fleste madrasser.

Lakenet er ergonomisk utformet og produseres i et sterkt materiale som glir bra både på vått og tørt underlag. Det er også utstyrt med håndtak beregnet til sideforflytning.

Røntgengjennomlysbart.

Rengjøring


Maskinvask maks. 95°. Kan tørketromles. Kan også tørkes av med alkoholbaserte rengjøringsmidler.

SPESIFIKASJONER

Materiale	Polyamid/polyester
Brann	SS 876 00 01, EN 597-1/2



Ved evakuering, dra fram borrelåsbåndene og spenn fast pasienten.

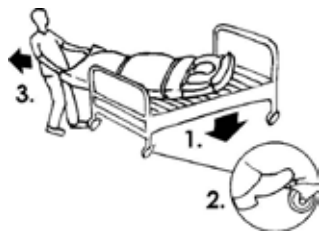

Grip håndtakene i fotenden og dra pasienten ned på gulvet.



Dra pasienten i sikkerhet.



Optimal evakueringslaken fungerer også nedover trapper.