

Bruksanvisning

2021-09-02

CuroCell S.A.M.[®] Switch

Reaktivt luftmadrass-system med konstant lavt trykk

Bruksanvisning, artikkelnummer: 95-001649



7 331345 070117



Innhold

ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER	3
1. Innledning	4
2. Produktbeskrivelse	5
3. Installasjon og oppstart	7
4. Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering	10
5. Oppbevaring	12
6. Vedlikehold	12
7. Feilsøking	12
8. Teknisk beskrivelse	13
9. Reservedeler	15
10. Tilleggsutstyr og tilbehør	16
11. Garanti	17
12. Annen informasjon	18
13. Egne notater	19

ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Les hele bruksanvisningen før bruk

ADVARSEL! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade:

1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet kan ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler (f.eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. Pumpen må ikke brukes i våtrom eller der det er risiko for at den kommer i kontakt med vann eller annen væske. Ikke ta i en pumpe som har vært i berøring med vann/væske. Trekk støpselet ut av stikkkontakten omgående, og send produktet til en autorisert servicetekniker for service.
3. Må ikke brukes i nærheten av eller i berøring med brannkilder/varme overflater som åpen ild, tente sigaretter eller varme lamper. Selv om produktet er branttestet, kan det bli skadet hvis det kommer i kontakt med varme.
4. Plasser og bruk produktet på en måte som hindrer at det kommer i klem eller blir skadd. NB: Vær spesielt oppmerksom på klemskader ved bruk av sengehester.
5. Bruk aldri produktet hvis pumpens kabel eller støpsel er defekt, pumpedekselet er skadd eller det ikke fungerer som det skal. Ta kontakt med servicetekniker for undersøkelse og reparasjon.
6. Kontroller jevnlig produktets funksjonalitet med hånden (se punkt 3.4). Kontroller også at komfortinnstillingen er korrekt som angitt i tabellen på pumpen.
7. Det er nødvendig med kontinuerlig overvåkning når produktet brukes til personer som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn.
8. Madrassen beskyttes av et hygienetrekk. Hvis det brukes flere hygienetrekk samtidig, kan det påvirke madrassens dampgjennomtrengelige egenskaper.
9. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig. For å unngå kveldningsrisiko må du påse at brukeren er plassert på riktig måte.
10. Unngå at hygienetrekket skades av skarpe gjenstander.
11. Hvis trekket har håndtak på langsiden, skal disse kun brukes til å løfte og flytte selve madrassen. All annen bruk skjer på egen risiko og omfattes ikke av produktgarantien.
12. For å redusere risikoen for at det oppstår skader på føttene, må du forvise deg om at brukeren ikke kommer i kontakt med pumpeoppheget.

1. Innledning

CuroCell S.A.M.[®] Switch er et reaktivt luftmadrass-system med konstant lavt trykk som kan brukes i en rekke pleiemiljøer, og som er svært funksjonell og kostnadseffektiv.



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Dette systemet er medisinsk utstyr med CE-merking i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (MDR) 2017/745 om medisinsk utstyr.

Systemet har blitt helt eller delvis designet og kontrollert i samsvar med standardene i kapittel 8.2. Standarder.

I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden.

1.2 Tiltentkt bruk

Systemet består av en pumpe og en madrass, og brukes til forebygging og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår/trykkskader (PU/PI).

1.3 Indikasjoner

For brukere med trykksår/trykkskader (PU/PI) opp til og med kategori 2¹. I tillegg til brukere med fare for å få PU/PI.

1.4 Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

1.5 Bruksområder

Systemene kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Det er tilgjengelig i tre modeller. CuroCell S.A.M.[®] Switch og CuroCell S.A.M.[®] Switch CF10 er overmadrasser, og legges på en undermadrass. CuroCell S.A.M.[®] Switch CF16 er en erstatningsmadrass som plasseres rett på sengebunnen. Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

NB!

- Ved bruk sammen med posisjoneringsputer må bruksanvisningen for puten leses nøye for å sikre at brukeren posisjoneres korrekt.
- Hvis du bruker dette produktet med et evakueringslaken, er det brukerens ansvar å påse at det er trygt å bruke til evakuering.
- Vær forsiktig ved bruk av sengehester eller annen beskyttelse på sengen, slik at madrassen ikke kommer i klem eller blir skadd.
- Madrassen må ikke løftes når en person ligger på den, eller brukes til noen annen form for transport bortsett fra eventuell evakuering ved bruk av evakueringslaken.
- Denne madrassen er uegnet for bruk under røntgenundersøkelser på grunn av risikoen for uskarpe bilder eller artefakter som kan resultere i feildiagnostisering.

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

1.6 Annen informasjon

Handlingsplan for trykksår/trykkskader

For best mulig resultat når produktet brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene «Handlingsplan for trykksår».

Madrasseveiledning

Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og foreskrivere når det velges en madrass fra Care of Sweden. CuroCell S.A.M® Switch er en madrass i funksjonsgruppe B. Du finner informasjon på hjemmesiden vår, www.careofsweden.com, og du kan også bestille informasjon fra kundeservice (se kontaktinformasjon på siste side).

2. Produktbeskrivelse

2.1 Pumpe

1. Frontpanel



2 Slangetilkoblinger.

Bakside

1. Sengekroker
2. Hovedstrømbryter (side)
Til å slå pumpen av/på.
Grønn lampe lyser når pumpen går.
3. Strømkabel



2.2 Frontpanel

Komfortinnstillinger


Komfortinnstillingen justerer lufttrykket i madrassen. Når bryteren vis medurs, øker lufttilførselen og -trykket i madrassen. Når bryteren vis moturs, avtar lufttilførselen og -trykket i madrassen.

Et passende lufttrykk ligger på mellom 1 og 8. Tabellen på pumpen gir veiledning, se 3.3. Komfortinnstillinger.



2.3 Madrass

1. Celler/luftblære
2. Slanger
3. Slangeholder
4. Tilkoblinger med tilbakeslagsventiler
5. Luft-/tilkoblingslanger

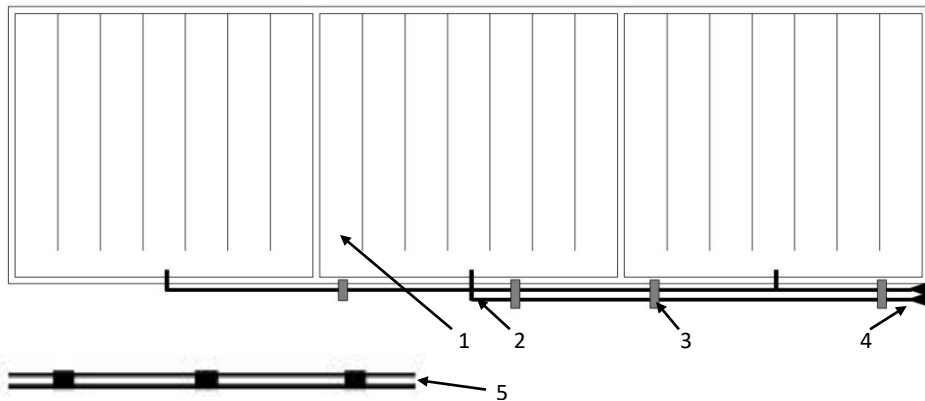

2.4 Andre deler

Hygienetrekk

Innvendig trekk Soft (tilbehør CuroCell S.A.M.® Switch)

Transport- og oppbevaringsveske (tilbehør)

Integrert skumkjerne (bare CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

3. Installasjon og oppstart

3.1 Installasjon

Kontroller ved utpakking av madrassen at ingen deler er skadd. Ved skade må du kontakte Care of Sweden eller den lokale distributøren før du tar produktet i bruk.

1a. Hvis madrassen er en overmadrass, legges den oppå en eksisterende madrass. Fest den om mulig ved å dra de elastiske båndene på bunnen over hjørnene på den underliggende madrassen.

eller

1b. Hvis madrassen er en erstatningsmadrass og har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), legger du madrassen direkte på sengebunnen. Bruk stroppene på trekket til å feste madrassen til sengebunnen.

2. Koble tilkoblingsslangene til madrassen. Disse skal kobles til ved madrassens fotende av, og du finner dem ved å åpne hygienetrekket. Når de er koblet til, trekker du igjen glidelåsen.

3. Heng pumpen ved sengens fotende, eller sett den på et flatt og stabilt underlag. Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den, kjøre over den med sengehjul eller slik at den ikke kommer i klem når du hever eller senker sengen.



4. Koble madrassens luftslanger til siden av pumpen.

5. Forviss deg om at strømbryteren står på "0" (av). Sett støpselet i en godkjent stikkontakt (220 V).



NB! Re opp sengen med laken for å øke brukerkomforten.

3.2 Oppstart og innstillinger



NB! Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1. Start pumpen ved å trykke på "1" (på), på siden av pumpen. Den grønne lampen lyser.
2. Pumpen begynner å fylle madrassen med luft.
3. Det tar 15–20 minutter.
4. Egned lufttrykk stilles inn ved hjelp av komforthjulet (1–8). Retningslinjer i henhold til brukervekt er oppgitt i tabellen på pumpen. Trykket må justeres mens brukeren ligger på sengen.
5. Kontroller det innstilte trykket med håndkontrollen, og juster ved behov.
6. Når trykket er stilt inn etter ønske, er det to alternativer:
 - a) Koble luft-/tilkoblingsslangene fra madrassen, og slå av pumpen. Madrassen er utstyrt med tilbakeslagsventiler, slik at luften ikke slipper ut av madrassen, og det innstilte trykket forblir stabilt.
 - b) Hold pumpen tilkoblet og i gang.

NB!

- Madrassen og pumpen skal kontrolleres med jevne mellomrom. Kontroller madrassen ved hjelp av håndkontrollen (se punkt 3.4). Ved behov kobles pumpen til igjen, og trykket justeres ved hjelp av pumpen.
- Hvis pumpen ikke er koblet til madrassen hele tiden, anbefaler vi at pumpen kobles til en gang i uken, og at trinn 6a og 6b i punkt 3.2 gjentas.

3.3 Komfortinnstillinger

Lufttrykket i madrassen kan justeres etter brukerens ønske om komfort. Rådfør deg alltid med den som har foreskrevet bruken eller annet behørig personell om riktig innstilling.

kg		
0-20	1	2
30-50	2	3
60-70	3	4
80-90	4	5
100-120	5	6
130-150	6	7
160-180	7	8
190-200	8	8

NB!

- Når sengens hodeende heves, skal trykket økes med ett (1) steg.
- For brukere med amputasjon, der bare en del av madrassen er belastet, skal trykket økes (med 1–2 steg).
- Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

3.4 Håndkontroll (funksjonskontroll)

Håndkontroll utføres for å kontrollere at madrassen er korrekt oppblåst. Dette skal gjøres regelmessig, én gang per skift, og ved posisjonsendringer eller ved endring av komfortinnstillingen.

Åpne trekket. Stikk en flat hånd inn under luftcellene under pasientens seteparti og kjenn etter at brukeren ikke ligger rett på den underliggende madrassen. Vi anbefaler 1-2 fingres margin.

Hvis du kjenner at vekten av pasienten hviler mot hånden din, må du øke komfortinnstillingen til neste øvre steg. Vent i 10 minutter, og utfør en ny håndsjekk.



3.5 HLR

I nødstilfeller der HLR (hjerte-lunge-redning) er nødvendig, tømmes madrassen ved å koble luftslangene til madrassen uten at slangene er koblet til pumpen. Utfør samme prosedyre etter bruk.



3.6 Lavt trykk

Ved unormalt lavt lufttrykk, se kapittel 7 for feilsøking.

ADVARSEL!

Hvis lufttrykket holder seg lavt, må du se etter skader på madrassen og slangene. Reparer ved behov, eller ta kontakt med distributøren.

4. Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering

Produktet kan brukes på nytt. Ved gjenbruk er det viktig å følge instruksjonene for rengjøring og rekondisjonering. Før produktet brukes av en ny bruker, anbefales det å rengjøre madrassen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Kontakt din hygieneansvarlig eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker.

Rengjøring og rekondisjonering må gjennomføres ved behov.

4.1 Rengjøring

PUMPE



Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet: f.eks. alkohol med eller uten tensider, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %, eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker pumpen.

MADRASSTREKK



Du kan tørke av trekkene med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % (maks. 10 % for trekk Stone) eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

Ekskrementer og blodflekker må fjernes så raskt som mulig. Bruk kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



Trekk som består av flere lag, skal separeres før vask. Delene må vaskes sammen med liknende farger.



Klor og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis det brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 % (maks. 10 % for trekk Stone).

INNVEDIG TREKK



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

4.2 Rekondisjonering

PUMPE

Se anvisninger under 4.1.

MADRASS

1. Koble slangetilkoblingen fra pumpen, og tøm madrassen for luft.
2. Fjern trekkene. Du finner mer informasjon om rengjøring av trekkene i punkt 4.1.
3. Flytt madrassen til et rent og egnet vaskeområde.
4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-modulen med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %. La det tørke.
5. Tørk av arbeidsflatene med egnet rengjøringsmiddel og/eller desinfiseringsmiddel.
6. Sett sammen madrassen. Hvis celler har løsnet fra slangene av en eller annen grunn, må de settes tilbake i henhold til tegningen i punkt 2.3.

SKUMKJERNE



Rengjør det berørte området med et mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel) og vann eller med et spritbasert desinfeksjonsmiddel som er beregnet til dette formålet. Press vannet forsiktig ut.

NB!

Kontroller hygienetrekket, cellene og slangene hver gang produktet rengjøres. Hvis det er skadet, må det skiftes eller repareres. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og strømkabelen ved rengjøring. Skadde deler må skiftes ut eller repareres.

Ikke vri opp eller rull sammen skumkjernen for å få ut vannet. La den tørke på et varmt sted med god ventilasjon (unngå direkte sollys). Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt.

5. Oppbevaring

Vi anbefaler å oppbevare madrassen og pumpen i produktvesken (tilbehør). Plasser pumpen slik at den er beskyttet av madrassen. Nedpakket produkt må håndteres varsomt. Ikke legg tunge gjenstander på det. Pumpen må oppbevares tørt, innendørs og ikke i direkte sollys.

6. Vedlikehold

1. Kontroller at strømkabelen og støpselet er uten skader og riper.
2. Kontroller at madrassstrekket er uskadd og at trekket og cellene er riktig satt sammen.
3. Kontroller at det kommer luft fra utløpene på siden av pumpen.
4. Kontroller at slanger og koblinger ikke er skadd eller i klem.

Hvis du trenger andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale distributøren.

7. Feilsøking

Problem	Løsning
Pumpen starter ikke.	Kontroller at strømkabelen er koblet til en stikkontakt. Kontroller at alle sikringer er OK.
Brukeren ligger rett på sengen.	Trykket kan være stilt inn feil. Juster det i henhold til vakttabellen, og vent noen minutter. Kontroller på nytt ved hjelp av "håndkontrollen", se kapittel 3.4. NB! Pumpen må kobles til først.
Madrassen ligger ikke stille.	Kontroller at madrassen er festet til undermadrassen med de elastiske båndene. Eller hvis madrassen har en integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), fester du den til sengebunnen med stroppene på trekket.
Pumpen støyer, eller vibrerer.	Kontroller pumpens opphenging på sengen. Fjern pumpen og lytt etter om dette gjør en forskjell. Kan løses ved å plassere pumpen på et flatt, stødig underlag eller ved å legge et håndkle mellom pumpen og sengen.
Hvis du ikke fant svar på spørsmålene dine her, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale distributøren.	

8. Teknisk beskrivelse

8.1 Tekniske spesifikasjoner

PUMPE		SPESIFIKASJONER
Modell		CuroCell S.A.M.®
Spennning		220 V-240 V, 50 Hz
Strømforbruk		0,05 A
Sikringstype		T1A/250 V
Dimensjoner (LxBxH)		25 x 12,5 x 8,5 cm
Vekt		1,4 kg
Omgivende miljø	Temperatur	Drift: 10 °C – 40 °C
		Oppbevaring: -15 °C – 50 °C
		Transport: -15 °C – 70 °C
	Fuktighet	Drift: 10 % – 90 % ikke-kondenserende
		Oppbevaring: 10 % – 90 % ikke-kondenserende
	Atmosfærisk trykk	700 hPa–1013,25 hPa
Klassifisering		Klasse II, Type BF, IP21
MADRASS		SPESIFIKASJONER
Modell		CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 / CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Dimensjoner (B x L x H)		80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm
Vekt		2,7 kg

NB! Care of Sweden forbeholder seg retten til å modifisere produktspesifikasjonene uten ytterligere forvarsel.

ADVARSEL!

Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene nøye for å forebygge personskader så vel som skader på produktet eller annet utstyr.

8.2 Standarder

Systemet er testet og godkjent i samsvar med følgende europeiske standarder, og gjeldende krav er oppfylt.

ICE 60601-1	EN ISO 10993	ISO 3746
IEC 60601-1-1-2	EN 12182	ISO 11201
IEC 60601-1-1-11	EN 597-1	
ICE 60601-1-6	EN 597-2	
ICE 62304	EN ISO 14971	

8.3 Merking

Madrasen er merket med produktnavn, produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse, vedlikeholds- og vaskeinstruksjoner, EAN-strekkode samt plass til egen merking. Det er også merket hvilken side som er opp/ned og hva som er hode-/fotende.

8.4 Forklaring av symboler



Art.nr.



Produzent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Fotplassering



Les bruksanvisningen



Funksjonsgruppe



CE-merket i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om



Gjenvinning



Må ikke kastes i restavfallet. Følg anvisningene for gjenvinning.



Anbefalt brukervekt



Brukerinformasjon – kategori



Rett på sengebunn



Oppå eksisterende madrass



Motvirk skjærkraft



Hælfunksjon



Må ikke vaskes



Maskinvaskes ved 70 °C



Maskinvaskes ved 95 °C



<1% Klor



Trommeltørking



Ikke trommeltørking



Drypptørkes



Kan ikke strykes



Skal ikke renses



Avtørking



Klasse II-utstyr (dobbeltsislet)




Type BF



IP-klasse (kapslingsgrad)



Temperaturområde

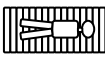

Madrassen skal bare brukes med brukeren liggende i lengderetningen



Distribuert av



UDI



Medisinsk utstyr

9. Reservedeler

Trekk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

	Trekk Steel, blått	Trekk Stone, grått
Størrelse	Art. Nei	Art. Nei
80 x 200 cm	294-080200	290-080200
80 x 210 cm	294-080210	290-080210
85 x 200 cm	294-085200	290-085200
85 x 210 cm	294-085210	290-085210
90 x 200 cm	294-090200	290-090200
90 x 210 cm	294-090210	290-090210
105 x 200 cm	294-105200	290-105200
105 x 210 cm	294-105210	290-105210
120 x 200 cm	294-120200	290-120200
120 x 210 cm	294-120210	290-120210

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

	Øvre del Olivia	Øvre del Stone	Nedre del CuroCell
Størrelse	Art. Nei	Art. Nei	Art. Nei
80 x 200 cm	431-080200	452-080200	CC-905610
80 x 210 cm	431-080210	452-080210	CC-905611
85 x 200 cm	431-085200	452-085200	CC-905612
85 x 210 cm	431-085210	452-085210	CC-905613
90 x 200 cm	431-090200	452-090200	CC-905614
90 x 210 cm	431-090210	452-090210	CC-905615
105 x 200 cm	431-105200	452-105200	CC-905616
105 x 210 cm	431-105210	452-105210	CC-905617
120 x 200 cm	431-120200	452-120200	CC-905618
120 x 210 cm	431-120210	452-120210	CC-905620

Luftceller inkl. slangesett, tilbakeslagsventil med hurtigkobling

Art.nr.	Størrelse
CC-250510	80 x 200 x 10 cm
CC-250511	80 x 210 x 10 cm
CC-250513	85 x 200 x 10 cm
CC-250514	85 x 210 x 10 cm
CC-250516	90 x 200 x 10 cm
CC-250517	90 x 210 x 10 cm
CC-250518	105 x 200 x 10 cm
CC-250519	120 x 200 x 10 cm

Art.nr.	Beskrivelse
CC-250101-E3	CuroCell S.A.M.®, pumpe uten hurtigkobling
CC-908068	Slangesett inkl. hurtigkobling

Hvis du trenger andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale distributøren.

10. Tilleggsutstyr og tilbehør

10.1 Tilleggsutstyr

Innvendig trekk Soft

Øker komforten ytterligere, kan også brukes for svært følsomme brukere. Dette er inkludert for CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16. Legg luftcellene inn i trekket med den myke skumsiden opp.

Solid transportveske

Transport- og oppbevaringsveske.

Trekk

Med sveisede sømmer.

10.2 Tilbehør

Trekk, CuroCell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Innvendig trekk Soft

Art. Nei	Størrelse
CC-928040	80 x 200 cm
CC-928041	80 x 210 cm
CC-928043	85 x 200 cm
CC-928044	85 x 210 cm
CC-928046	90 x 200 cm
CC-928047	90 x 210 cm
CC-928048	105 x 200 cm
CC-928050	105 x 210 cm
CC-928049	120 x 200 cm
CC-928051	120 x 210 cm

Art.nr. Beskrivelse

CC-9091	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch 80–90 cm
CC-9093	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF10 80–105 cm og CuroCell S.A.M.® Switch 105–120 cm
CC-9094	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® CF10 Switch 120 cm
58-900909	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF16 80–90 cm
58-900905	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF16 105–120 cm

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Innvendig trekk Soft med skumlomme

Art. Nei	Størrelse
CC-928060	80 x 200 cm
CC-928061	80 x 210 cm
CC-928063	85 x 200 cm
CC-928064	85 x 210 cm
CC-928066	90 x 200 cm
CC-928067	90 x 210 cm
CC-928068	105 x 200 cm
CC-928070	105 x 210 cm
CC-928069	120 x 200 cm
CC-928071	120 x 210 cm

10.3 Annet tilbehør

For beste komfort anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden, ettersom disse produktene er tilpasset til å fungere godt sammen. Ta kontakt med Care of Sweden eller den lokale distributøren ved behov for tilbehør eller mer informasjon om produktene våre.

11. Garanti

11.1 Omfang

Dette CuroCell®-systemet omfattes av en to års garanti vedrørende produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering/stell.

11.2 Service og reparasjon

Madrasen CuroCell® er medisinsk utstyr i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, og den brukes som hjelpemiddel i forebygging og behandling av trykksår/trykkskader. Derfor anbefaler vi at produktet regelmessig gjennomgår service og kontroll for å opprettholde funksjonalitet og yteevne. En velholdt pumpe arbeider bedre og holder lenger, i likhet med annet teknisk utstyr.

I produktets forventede levetid vil enkelte av pumpens deler bli slitt og få behov for service for å beholde funksjonalitet og ytelse. Service må utføres av sertifisert servicetekniker. Omfanget og intervallene for service avhenger av hvor ofte og hvordan produktet brukes.

Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller en av våre autoriserte teknikere. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Care of Sweden. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, opphever garantien.

Et garantikrav skal meldes til Care of Sweden før produktet returneres.

Ta kontakt med Care of Sweden eller den lokale distributøren hvis du har spørsmål vedrørende garanti og service.

11.3 Levetid

Produktet har en anslått levetid på 5 år.

12. Annen informasjon

12.1 Demontering og gjenvinning

Bortsett fra enkelte deler i pumpen kan nesten alle materialer i CuroCell®-produkter energigjenvinnes i forbrenningsanlegg.

Pumpe:

En brukt CuroCell®-pumpe skal ikke demonteres. Den skal leveres til en gjenvinningsstasjon og kildesorteres som elektronikkavfall.


Madrass:

En brukt CuroCell®-madrass leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart avfall.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale forhandleren.

12.2 Returer og reklamasjoner

Reklamasjoner rettes til distributøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til distributørens anvisninger, og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til speditøren.

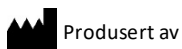

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: + 46 771 106 600

Faks: + 46 325 128 40

E-post: export@careofsweden.se

Internett: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB
P.O. Box 146
SE-514 23 Tranemo
SVERIGE

Besøksadresse:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Lasteadresse:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker for Care of Sweden AB
© Care of Sweden AB, 2021