


# HURTIGVEILEDNING

CuroCell S.A.M. Switch

CuroCell S.A.M. Switch CF16

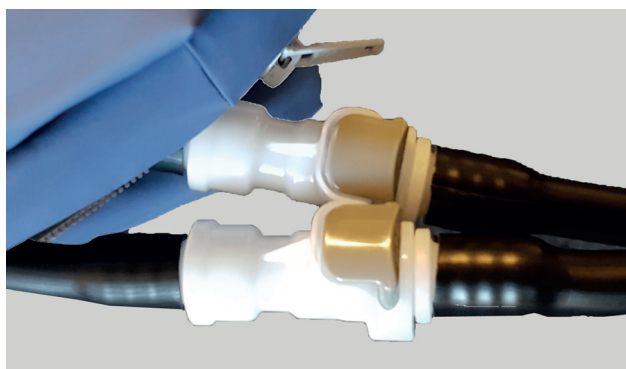

1


Koble sammen madrassen og pumpen via slangesettet. Slå pumpen på og fyll madrassen til ønsket brukervekt iht. veiledningen på toppen av pumpen.



2

Når madrassen er fylt til ønsket nivå (20-25 min.), koble fra slangesettet og slå av pumpen.

Gjør en håndsjekk for å kontrollere at madrassen er fylt tilfredsstillende.

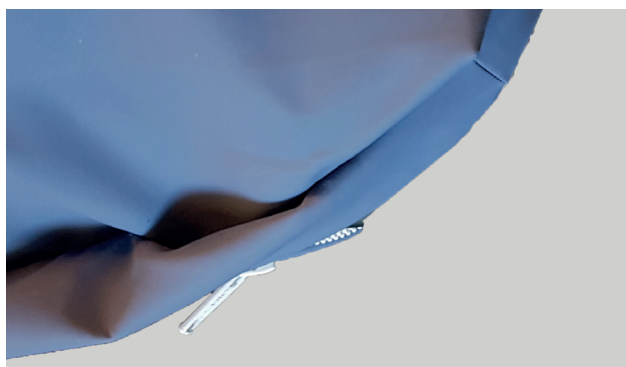

3

Skyv enveisventilene inn i trekket og dra igjen glidelåsen.

Gjør deretter en håndsjekk minimum en gang daglig og etterfyll luft om nødvendig.



MEDIQ