

Bruksanvisning

2021-05-21

Apollo 6

Bruksanvisning, artikelnummer: 95-001656



7331345070254



Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	2
1 Innledning	3
2 Produktbeskrivelse og -ytelse	4
3 Pakke ut madrassen	4
4 Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering	5
5 Diverse	6
6 Forklaring av symboler	7

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les hele bruksanvisningen før bruk

ADVARSEL!

1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet må ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler, tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne håndboken eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. **MÅ IKKE BRUKES** i nærheten av eller i kontakt med åpen ild eller varme overflater, for eksempel peis, tente sigaretter eller varme lamper. Selv om produktet er branntestet, kan det bli skadet hvis det kommer i kontakt med varme.
3. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke kommer i klem eller blir skadet. NB! Vær spesielt oppmerksom ved bruk av sengehester.
4. Kontroller alltid at madrassen har riktig størrelse.
5. Madrassen beskyttes av et hygienetrekk. Hvis det brukes flere hygienetrekk samtidig, kan det påvirke madrassens dampgjennomtrengelige egenskaper.
6. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig (damp ledes bort). For å unngå kvelningsrisiko må du påse at brukeren er plassert på riktig måte.
7. Ikke skad hygienetrekket med skarpe gjenstander.

1 Innledning



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Dette produktet er medisinsk utstyr, og er CE-merket i henhold Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden. Det oppfyller også gjeldende standarder iht. følgende medisinske direktiver: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS 876 00 11, SS 876 00 20, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, EN 597-1, EN 597-2.

1.2 Tiltentk bruk

Madrassen kan brukes til forebygging og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår/trykkskader (PU/PI).

1.3 Indikasjoner

For brukere med trykksår/trykkskader (PU/PI) opp til og med kategori 2.

1.4 Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

1.5 Bruksområder

Madrassene kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Det er en overmadrass. Anbefalt brukervekt er inntil 140 kg.

1.6 Annen informasjon

Handlingsplan for trykksår/trykkskader

For best mulig resultat når disse produktene brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene «Handlingsplan for trykksår».

Madrasseveiledningen

Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og foreskrivere når det velges en madrass fra Care of Sweden. Apollo 6 er en madrass i funksjonsgruppe C. Du finner informasjon på www.careofsweden.com, og du kan også bestille informasjon fra kundeservice (se kontaktinformasjon på siste side).

2 Produktbeskrivelse og -ytelse

Apollo 6 fås i følgende størrelser som standard – 80/85/90/105/120 x 200/210 cm. Hvis du har behov for andre størrelser, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale forhandleren.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale forhandleren.

2.1 Introduksjon til trekk

Trekket er et såkalt hygienetrekk. Det er enkelt å håndtere og vedlikeholde, og det overholder de strenge kravene til rengjøring og hygiene. Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig, noe som betyr at damp transporteres bort, slik at risikoen for hudbløtgjøring reduseres.

2.2 Produktbeskrivelse

Kjerne: Viskoselastisk skum 55 kg/m³

Høyde: 6 cm

Trekk: Polyuretan

Anbefalt brukervekt: 0–140 kg*

Garanti: 2 år

*Legg merke til at under madrassen påvirker funksjonen, inkludert anbefalt brukervekt.

3 Pakke ut madrassen

Madrassene våre leveres komprimert i resirkulerbar plast. Årsaken til komprimeringen er å gjøre det enklere å håndtere madrassen ved transport.

1. Det første du må gjøre, er å undersøke at varene ikke har blitt skadet. Fjern plastposen og alle beskyttende materialer. Ikke bruk kniv, da den kan skade hygienetrekket.
2. Juster trekket. Legg trekket over madrassen, og lukk glidelåsen.
3. Det er lurt å pakke ut madrassen og la den ligge flatt i to timer før den brukes. Madrassen kan imidlertid tas i bruk med en gang ved behov. Det kan ta opp til en uke før madrassen har oppnådd full bredde/lengde/høyde etter komprimeringen.



4 Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering

Produktet kan brukes på nytt. Ved gjenbruk er det viktig å følge instruksjonene for rengjøring og rekondisjonering. Før produktet brukes av en ny bruker, anbefales det å rengjøre madrassen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Kontakt din hygieneansvarlig eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker.

Rengjøring og rekondisjonering må gjennomføres ved behov.

4.1 Hygienetrekk

Du kan tørke av trekkene med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker platen på pumpehuset.



Avføring og blodflekker må fjernes omgående med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



4.2 Madrasskjerne



Hygienetrekket beskytter skumkjernen helt, noe som betyr at man sjelden trenger å rengjøre kjernen. Hvis kjernen av en eller annen grunn må rengjøres, bruker du et mildt rengjøringsmiddel og vann (sprayes for eksempel på). Klem vannet forsiktig ut.

La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. Du kan bruke en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.

NB:

Kontroller hygienetrekket hver gang det rengjøres. Hvis trekket er skadet, må det skiftes ut eller repareres. Følg de lokale instruksjonene og anvisningene for rengjøringsmidlene

5 Diverse

5.1 Oppbevaring

Madrassen må oppbevares flatt eller forsiktig brettet / rullet sammen, med lukket glidelås. Den skal oppbevares ved romtemperatur på et tørt sted. Madrassen må oppbevares slik at den ikke kan bli utsatt for støt eller annen mekanisk påvirkning. Madrassen må ikke utsettes for direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares lenger enn tre måneder, anbefaler vi at den oppbevares flatt.

5.2 Merking

Madrassene er merket med produksjonsdato, varenummer, størrelse, vedlikeholdsråd og EAN-nummer. I tillegg er det plass til egne notater (for eksempel avdelingsnummer og navn).

5.3 Garanti

Se kapittel 2.2. Garantien gjelder produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje, svekkelse av produktet eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering.

5.4 Service og vedlikehold

Madrassen trenger ikke annen service eller vedlikehold enn rengjøring som beskrevet i denne bruksanvisningen.

5.5 Reparasjoner

Ta kontakt med leverandøren for anvisninger.

5.6 Resirkulering

Madrassene kan resirkuleres i sin helhet, og de skal sorteres som «brennbart avfall». Det er ikke behov for demontering.

5.7 Returer og reklamasjoner

Reklamasjoner rettes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens anvisninger, og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til transportøren.

6 Forklaring av symboler



Artikkelnummer



Produsent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Les bruks-
anvisningen



CE-merket i samsvar med
Europaparlaments- og
rådsforordning (EU)



Gjenvinning



Anbefalt brukervekt



Oppå eksisterende
madrass



Kan roteres



Kan snus



Motvirker
vevsforskyvning



Plasseres øverst



Maskinvaskes ved 95 °C



<1%
Klor



Trommeltørking



Dryptørkes



Kan ikke strykes



Skal ikke renses



Tørkes ren




Distribuert av



Medisinsk utstyr



UDI

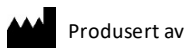

Produsert av



Care of Sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: + 46 771 106 600

Faks: + 46 325 128 40

E-post: export@careofsweden.se

Internett: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB
P.O. Box 146
SE-514 23 Tranemo
SVERIGE

Besøksadresse:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Lasteadresse:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB
© Care of Sweden AB, 2021