

BRUKERMANUAL

GRINDTREKK QVINTETT



Monteringsanvisning


1. Dra grinden opp.
2. Plasser grindtrekket med åpningen for nedfellingsanordningene ut.




3. Dra igjen glidelåsen.



4. Knepp igjen grindtrekket ved hjelp av de tre trykknappene.

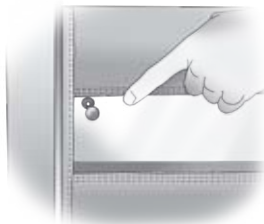

5. Fest borrelåsen på sengens metallangside. OBS! Må ikke festes på sengens bevegelige deler (liggeflaten).

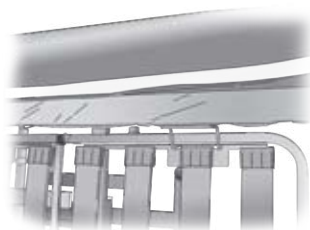

Rengjøring

Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler.

Kan også vaskes i maskin maks 40°.

OBS! Grindtrekket kan ikke tørkes i tørketrommel.



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig