

FEILSØKNINGSSKJEMA

Qvintett

1	Sengen fungerer av og til	Bytt håndkontroll	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Bytt elektronikk

2	En motorfunksjon er borte	Kontroller motor-kontakter	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Bytt håndkontroll

Feilen forsvinner	
Feilen fortsetter	Om relelyd høres ved aktivering - bytt motor for den funksjonen

3	Sengen klarer ikke å løfte med normal belastning	Bytt elektronikk	
		Feilen fortsetter	Bytt løftemotor

4	Sengen er helt stille ved aktivering	Bytt håndkontroll	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Se over kontakt-ene inn til elektronikkboksen

Feilen forsvinner	
Feilen fortsetter	Elektronikkboks