


Kontroll av og feilretting ved funksjonsbortfall på Pleieseng Qvintett med motorsystem P

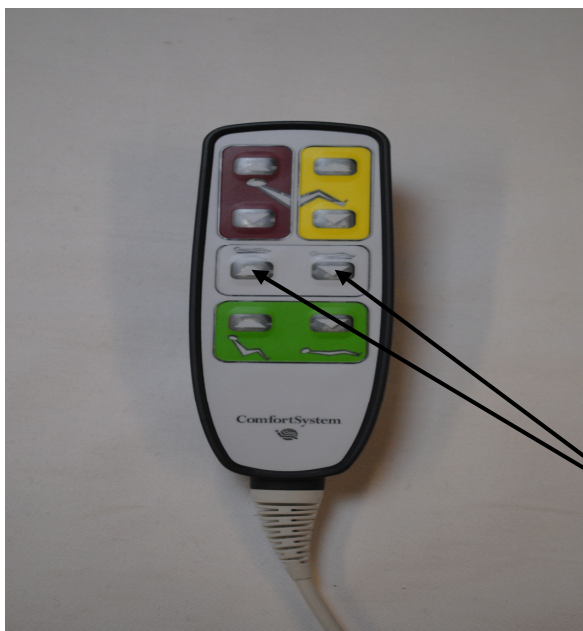

0-stillingsknapper

VED BYTTE AV KOMPONENTER I MOTORSYSTEMET SKAL VEGGKONTAKTEN TAS UT

1. Ingen reaksjon ved trykk på håndkontrollens funksjonsknapper

Kontroller at kontakten for elektronikk er tilkoblet til vegguttaket og at grønn kontrollampe lyser.

Kontroller at alle motorkontakter er tilkoblet på riktig måte og i riktig port.

0-still elektronikken ved å trykke inn begge knapper for sengeløftfunksjonen (seng opp og seng ned) nøyaktig samtidig.

En pulserende pipelyd oppstår, slipp knappene først når pipelyden har opphørt.

Prøvekjør samtlige av sengens funksjoner. Begynn alltid med fotmotor (gul knapp **NED**) og kjør denne til laveste posisjon..

Vedvarer problemet erstattes håndkontroll.

Vedvarer problemet byttes elektronikk og bytt tilbake til opprinnelig håndkontroll.

0-still og prøvekjør sengen i henhold til punkt 2.

2. Feilsignal (pipelyd) oppstår ved trykk på noen av håndkontrollens knapper.

0-still elektronikken ved å trykke inn begge knapper for sengeløftfunksjonen (seng opp og seng ned) nøyaktig samtidig.

En pulserende pipelyd oppstår, slipp knappene først når pipelyden har opphørt.

Prøvekjør samtlige av sengens funksjoner. Begynn alltid med fotmotor (gul knapp **NED**) og kjør denne til laveste posisjon. Her kan man evt. Høre en pipelyd fortsatt.

Pipelyden skal dog være borte når man kjører den gule knappen UPP mot høyeste posisjon.

Fortsett deretter å kjøre samtlige gjenværende funksjoner (også grønn knapp) i sitt fulle bevegelsesutslag.

3. Ryggmotor funksjonsbortfall

(eller mislyd ved aktivering av ryggmotorens funksjon.)

Bytt ryggmotor.

Mislyd i ryggmotoren ved aktivering av samtlige funktioner, bytt ryggmotor og elektronikk.

4. Feilsignal (pipelyd) ved aktivering av fotmotor og Comfortleie-knappar (grønn knapp).

0-still elektronikken og prøvekjør sengen **på samme vis som i punkt 2.**

Om feil vedvarer byttes fotmotor.